


คำแนะนำในการทดสอบเชื้อไวรัสด้วยตัวเอง



อย่าดำเนินการทดสอบหาก

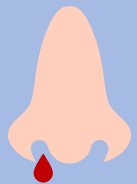

มีเลือดกำเดาไหลใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา



มีการผ่าตัดจมูก ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา



มีอาการบาดเจ็บที่ใบหน้าในช่วง 8 สัปดาห์ที่ผ่านมา

ขั้นตอนในการทดสอบ

1

กรุณาล้างมือให้สะอาด ก่อนเริ่มต้นการทดสอบ



2

ก่อนเริ่มการทดสอบโปรดนำไม้สำลี 1 อัน หลอดน้ำยา 1 หลอด และดรัม 1 ดรัมออกมา แล้วคลายฝาสิ่และเอาดรัมออกจากบรรจุภัณฑ์



3

นำไม้สำลีออกจากบรรจุภัณฑ์




4

สอดไม้เข้าไปในรูจมูกประมาณ 2.5 ซม. หมุนวนไม้ให้ครบ 5 ครั้ง แล้วทิ้งไว้ อีก 5 วินาที




5

ใช้ไม้สำลีเดิมทำซ้ำกับรูจมูกอีกข้างหนึ่ง

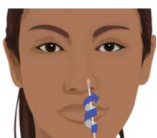


6

ใส่ไม้สำลีเข้าไปในหลอดน้ำยา และพลิกขึ้นลงเป็นเวลา 15 วินาที

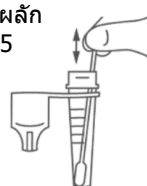

7

บีบหลอดน้ำยาเมื่อตั้งไม้สำลีออก

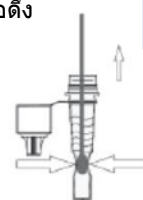

8

ปิดฝาหลอดน้ำยาให้แน่น คุณจะได้ยินเสียงดังคลิก



9

ใช้นิ้วเคาะเบา ๆ ที่ข้าง ๆ ของหลอดสามสี่ครั้ง จะเป็นการช่วยผสมสารละลาย



10

ให้หยด 3 หยดลงในช่องตัวอย่างของดรัมทดสอบ



11

กรุณารอ 15 นาทีก่อนตรวจสอบผล อยู่บนดรัม โปรดให้ดรัมวางอยู่บนพื้นผิวเรียบตลอดระยะเวลา

15 mins



12

อ่านผลลัพธ์บนที่ดรัมทดสอบ **หาก**คุณเห็นเส้นอยู่ที่ตำแหน่ง **ทั้งตัว ซี และ ที** นี่หมายถึงว่า **ผลการทดสอบของคุณเชิงบวก** โปรดไปพบแพทย์เพื่อ **ทำการประเมินและทดสอบยืนยันเพิ่มเติม**

หากคุณเห็นเส้นปรากฏเฉพาะที่ตำแหน่ง **ตัว ซี** นี่เป็นการ **ทดสอบเชิงลบ**

หากคุณเห็นเส้นปรากฏอยู่ที่ตำแหน่ง **ตัว ที** เท่านั้น หมายถึงผลการทดสอบไม่ถูกต้อง โปรดทำการทดสอบใหม่โดยใช้ชุดทดสอบอื่น

13

ทิ้งไม้สำลี หลอดน้ำยาและดรัมทดสอบที่ใช้แล้วทั้งหมดลงในถุงปลอดสารพิษ




14


ล้างมือให้สะอาดหลังการทดสอบ



เชิงบวก

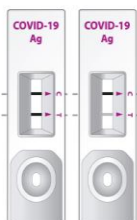

เชิงลบ

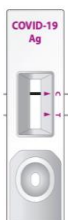

ไม่ถูกต้อง



"C" Control Line
"T" Test Line